



KOD KATALOGOWY	PCO-T-01
NAZWA HANDLOWA	KOMPRESYJNE ORTEZY POSTURALNE
MODEL	PCO-T-01
CODE	PCO-T-01
TRADE NAME	POSTURAL COMPRESSION ORTHOSES
MODEL	PCO-T-01

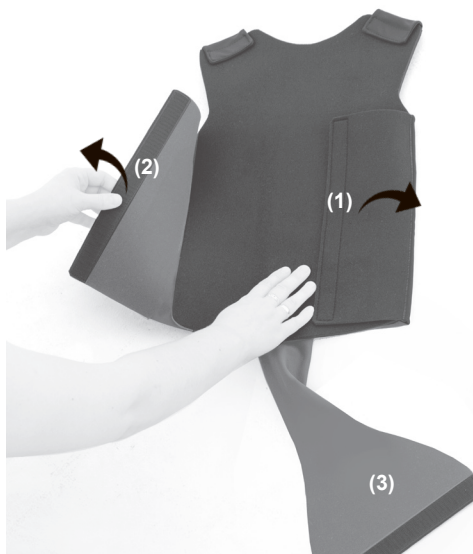

- 1. PL:** Odepnij rzepy (1,2,3) od tylnej części kamizelki.
EN: Unfasten the Velcro (1,2,3) on the back of the vest.

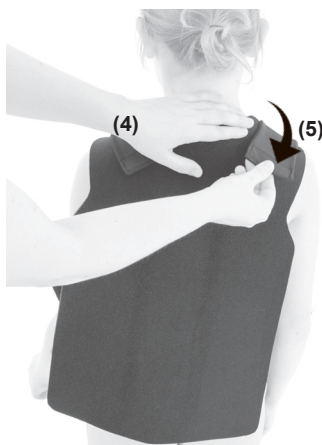


- 2. PL:** Załóż ortezę na ramiona.
EN: Put the brace on your arms.
- 3. PL:** Dopasuj górną część ortezi do sylwetki, za pomocą rzepów (4,5) w okolicy barków.
EN: Adjust the upper part of the brace to your body shape using the Velcro straps (4,5) in the shoulder area.



4. PL: Ustaw odpowiednią kompresję kamizelki zapinając tył ortezy na rzepy (6,7).

EN: Set the proper compression of the vest by fastening the back of the brace with Velcro (6,7).

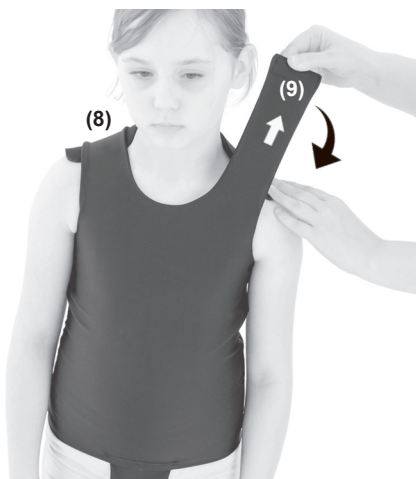

5. PL: Ustaw odpowiednią kompresję górnej części kamizelki za pomocą rzepów (8,9).

EN: Set proper compression of the top of the vest with Velcro (8,9).



6. PL: Zapnij element stabilizujący w kroczu (10) na rzep.

EN: Fasten the crotch stabilizing part (10) with Velcro.





7. **PL:** Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.